



Digitální sterilizátor SilverFox S-01D

VÍTEJTE!

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroj si prosím pozorně přečtete následující instrukce. Pokud si nebudete jistí správným používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné úrazy, k nimž dojde při nesprávném použití.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu detailů u nástrojů bez předchozího upozornění. Pokud jsou v návodu uvedeny nějaké chyby, informujte prosím výrobce nebo dodavatele.

Vysokoteplotní sterilizátor má okamžitou čistící a sterilizační funkci. Je určený pro kosmetické salony, kliniky, laboratoře atd., ke sterilizaci nůžek, pinzet a jiných drobných kovových nástrojů.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje tyto požadavky:

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES.
2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Do přístroje vsypte všechny přiložené perličky. Přístroj zapojte do el. sítě a zapněte jej. Stiskněte přepínač, přístroj vydá zvukový signál, displej zobrazí „15“ a přístroj začne nahřívat a odpočítávat 15 minut do úplného nahřátí.
2. Po uplynutí této doby se ozve 3x signál a přístroj je připraven k použití. Na displeji se zobrazí „00“ - pohotovostní režim.
3. Nyní můžete do sterilizátoru vložit nástroje a stisknutím tlačítka „START“ jej uvedete do provozu. Sterilizace trvá 20 sekund, tato doba je odpočítávána na displeji. Po dokončení sterilizace se ozve 3x signál. Poté se sterilizátor přepne do stavu „00“ - pohotovostní režim a je připraven pro další provoz.
4. Po 8 hodinách od zapnutí se přístroj automaticky přepíná do ochranného režimu - ozve se 5x signál, sterilizátor přestane nahřívat a na displeji se zobrazí „--“. Pokud je přístroj v procesu sterilizace, pak se režim „--“ zapne až po dokončení procesu.
5. Pokud je přístroj přepnutý do ochranného režimu a chcete jej znovu použít ke sterilizaci, vypněte jej a postupujte opakovaně od bodu 1.

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte sterilizátor ve vlhkém prostředí (např. v koupelně apod.).
2. Přístroj používejte v dobře ventilovaném prostředí a na stabilním pracovním stole.
3. Nástroje vkládejte do sterilizátoru předem dobře otřené hadříkem.
4. Křemenné perličky uvnitř sterilizátoru je nutné čistit po každém použití – propláchnout čistou vodou nebo slabým dezinfekčním roztokem (poměr 1:100).
5. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou křemenné perličky poškozeny – může dojít k nedostatečnému vyčištění nástrojů.
6. Skleněné perličky by měly být dány do přístroje nejprve před zapnutím přístroje.
7. Pokud je přístroj v pracovním stavu, nesmí být zakryt žádným ručníkem, plastovou taškou nebo jiným přehozem.
8. Nevkládejte do sterilizátoru nástroje, které nejsou odolné proti vysokým teplotám, jako plastové stěrky a jiné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem: 152 ml

Doporučená provozní doba: 15 min

Výkon: 80 W

Rozměry výrobku: 20 x 20 x 19 cm

Hmotnost produktu: 0,8 kg

Rozměry balení: 22 x 22 x 22 cm

Hmotnost balení: 1,25 kg

Napětí: 100V-120V/220V-240V

Frekvence: 50-60Hz



Digitálny sterilizátor SilverFox S-01D

VITAJTE!

Ďakujeme za nákup. Pred použitím prístroj si prosím pozorne prečítate nasledujúce inštrukcie. Ak si nebudete istí správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, ku ktorým dôjde pri nesprávnom použití.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu detailov u nástrojov bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sú v návode uvedené nejaké chyby, prosím informujte výrobcu alebo dodávateľa.

Vysokoteplotný sterilizátor má okamžitú čistiacu a sterilizačnú funkciu. Je určený pre kozmetické salóny, kliniky, laboratória atď., Na sterilizáciu nožníc, pinziet a iných drobných kovových nástrojov.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky:

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES
2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej komptabilite: 2004/108/EC

NÁVOD K POUŽITIE

1. Do prístroja vsypte všetky priložené perličky. Prístroj zapojte do el. siete a zapnite ho. Stlačte prepínač, prístroj vydá zvukový signál, displej zobrazí "15" a prístroj začne nahrievať a odpočítavať 15 minút do úplného nahriatie.
2. Po uplynutí tejto doby sa ozve 3x signál a prístroj je pripravený na použitie. Na displeji sa zobrazí "00" - pohotovostný režim.
3. Teraz môžete do sterilizátora vložiť nástroje a stlačením tlačidla "START" ho uvediete do prevádzky. Sterilizácia trvá 20 sekúnd, táto doba je odpočítavaná na displeji. Po dokončení sterilizácie sa ozve 3x signál. Potom sa sterilizátor prepne do stavu "00" - pohotovostný režim a je pripravený pre ďalšiu prevádzku.
4. Po 8 hodinách od zapnutia sa prístroj automaticky prepína do ochranného režimu - ozve sa 5x signál, sterilizátor prestane nahrievať a na displeji sa zobrazí "-". Pokiaľ je prístroj v procese sterilizácie, potom sa režim "-" zapne až po dokončení procesu.
5. Ak je prístroj prepnutý do ochranného režimu a chcete ho znovu použiť na sterilizáciu, vypnite ho a postupujte opakovane od bodu 1.

UPOZORNENIE

1. Nepoužívajte sterilizátor vo vlhkom prostredí (napr. V kúpeľni a pod.).
2. Prístroj používajte v dobre vetranom prostredí a na stabilnom pracovnom stole.
3. Nástroje vkladajte do sterilizátora vopred dobre utreté handričkou.
4. Kremenné perličky vnútri sterilizátora je nutné čistiť po každom použití - prepláchnuť čistou vodou alebo slabým dezinfekčným roztokom (pomer 1: 100).
5. Nepoužívajte prístroj, ak sú kremenné perličky poškodené - môže dôjsť k nedostatočnému vyčisteniu nástrojov.
6. Sklené perly by mali byť dané do prístroja najprv pred zapnutím prístroja.
7. Ak je prístroj v pracovnom stave, nesmie byť zakrytý žiadnym uterákom, plastovou taškou alebo iným prikrývkou.
8. Nevkladajte do sterilizátora nástroje, ktoré nie sú odolné proti vysokým teplotám, ako plastové stierky a iné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem: 152 ml
Odporúčaná prevádzková doba: 15 min
Výkon: 80 W
Rozmery výrobku: 20 x 20 x 19 cm
Hmotnosť produktu: 0,8 kg

Rozmery balenia: 22 x 22 x 22 cm
Hmotnosť balenia: 1,25 kg
Napätie: 100V-120V / 220V-240V
Frekvencia: 50-60 Hz